

INSTRUCCIONES DE INSERCIÓN

El tapón intracanalicular OASIS® Form Fit™ es un tapón universal que sirve para todo tamaño. Form Fit™ se suministra en estado seco (parece un tapón de colágeno) y se expande quedando un material blando, maleable y gelatinoso cuando hace contacto con la película lagrimal y tarda unos 10 minutos en hidratarse completamente. Form Fit™ se envasa en bolsas individuales y esterilizadas, y viene previamente cargado dentro de una funda de poliimida que actúa como guía para insertar el tapón.

ANESTESIA

Anestésie el área del punto lagrimal con un anestésico tópico instilado en el saco conjuntival o con un aplicador de punta de algodón empapado en anestésico sostenido contra el punto durante 30 segundos.

NO SE NECESITA MEDIR

No es necesario tomar medidas del punto lagrimal. El tapón Form Fit™ tiene un solo tamaño y está diseñado para llenar toda la cavidad canalicular vertical una vez que haga contacto con la película lagrimal.

DILATACIÓN

El diámetro de la funda de poliimida es de 0,4 mm, así que sólo es necesario dilatar en el caso de pacientes con puntos lagrimales muy pequeños. Para pacientes con puntos muy pequeños, dilate suavemente el punto e inserte rápidamente la funda de poliimida.

INSERCIÓN

Inserte la funda de poliimida anaranjada dentro del punto lagrimal. Para sacar el tapón de hidrogel Form Fit™ desde dentro de la funda de poliimida y ponerlo en la cavidad canalicular vertical, apriete completamente el insertador en la parte superior de las porciones acanaladas de los lados comprimibles. Retire cuidadosamente el insertador.

Cuando se inserte correctamente, el tapón de hidrogel Form Fit™ debe estar completamente dentro de la cavidad y no debe quedar expuesto sobre la abertura puntal.

NOTA: El insertador que se muestra es el insertador de primera generación. Al terminar el primer trimestre de 2005 se dispondrá de un insertador de segunda generación, el cual moverá el área de compresión más cerca de la punta del insertador.

